 Serviço de Enfermagem SESAU	INSTRUÇÃO DE TRABALHO – ENF.APS-IT-06	
	Título: MONTAGEM DAS BANDEJAS E USO DA SELADORA	Data: NOV/2011
		Versão: 0
		Página 1 de 2

Responsáveis

Preparado por: Enfermeiros	Analisado por: Serviço de Enfermagem	Aprovado por: DAS
-----------------------------------	---	--------------------------


1. Objetivos	2. Aplicação
Garantir um processo de esterilização seguro e eficaz assegurando os procedimentos realizados na unidade sem riscos para o serviço e usuário.	A equipe de enfermagem.

3. Terminologia

DAS – Diretoria de assistência à saúde.

4. Diretrizes Normativas

Nº	Ação (O quê)	Atribuição (Quem)	Informações Complementares (Como).
1	Realizar desinfecção da seladora no início do plantão;	Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem	Desinfetar a seladora com um pano umedecido com álcool 70% por meio de fricção;
2	Verificar voltagem da tomada;	Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem	Checar se a tomada corresponde a voltagem especificada na seladora, antes de ligá-la. Comunicar a chefia imediata qualquer alteração;
3	Realizar a montagem das bandejas;	Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem	Montar as bandejas, conforme Disposição Geral 5.1 , zelando para não contaminar novamente os artigos;
4	Checar o funcionamento dos instrumentais;	Técnico de Enfermagem	Verificar o adequado funcionamento de pinças e tesouras. Encaminhar a bandeja inteira para a gerência da unidade caso apresente alguma alteração;
5	Selecionar a embalagem;	Técnico de Enfermagem	Escolher o tamanho adequado do papel grau cirúrgico;
6	Ligar a seladora;	Técnico de Enfermagem	Colocar a alavanca na posição "liga" que a lâmpada piloto acenderá;
7	Ajustar o pirômetro;	Técnico de Enfermagem	Colocar em 200°C, os leds do pirômetro acenderão. Esperar até que o led rele do pirômetro apague. Neste momento a seladora está pronta para operar;
8	Embalar a bandeja;	Técnico de Enfermagem	Puxar a embalagem no comprimento necessário, abaixar a alavanca para frente por aproximadamente 2 segundos e corte a embalagem movimentando o dispositivo de corte de um lado para outro. O papel pode ser cortado antes de ser selado, o procedimento é o mesmo. Colocar a alavanca na posição e retire a embalagem selada;
9	Repetir o processo caso a embalagem não esteja corretamente selada;	Técnico de Enfermagem	Aumentar em 10°C e aguarde a lâmpada apagar e realize uma nova selagem. Repita este procedimento até conseguir uma selagem perfeita;
10	Desligar a seladora;	Técnico de Enfermagem	Terminando os trabalhos, desligue a seladora na chave liga/desliga, retirando da tomada;
11	Identificar a bandeja;	Técnico de Enfermagem	Colocar data, nome e unidade com caneta esferográfica na aba da embalagem;

 Serviço de Enfermagem SESAU	INSTRUÇÃO DE TRABALHO – ENF.APS-IT-06	
	Título: MONTAGEM DAS BANDEJAS E USO DA SELADORA	Data: NOV/2011
		Versão: 0
		Página 2 de 2

12	Encaminhar a bandeja para esterilização;	Técnico de Enfermagem	Conforme ENF.APS-IT-04 Cuidados com a Autoclave
13	Deixar o ambiente organizado.	Técnico de Enfermagem	Conforme ENF.APS-IT03 Limpeza e Desinfecção de Limpeza de Artigos.

5. Disposições Gerais

5.1 Bandejas de procedimentos:

Realizar a montagem das bandejas colocando os instrumentais de forma organizada facilitando sua visualização pela embalagem.

Bandeja de cateterismo vesical: 01 cuba rim, 01 cuba redonda, 01 pinça Cherron, 01 campo fenestrado e 10 gazes;

Bandeja de sutura: 01 pinça Kelly reta, 01 pinça Kelly curva, 01 porta agulha, 01 tesoura, 01 pinça anatômica, 01 pinça dente-de-rato, 01 campo fenestrado, 01 cuba redonda e 10 gazes;

Pacote de curativo: 01 pinça Kelly reta, 01 pinça anatômica, 01 espátula e 10 gazes;

Bandeja de parto: 02 pinças Kelly reta, 02 pinças Kelly curva, 01 tesoura de Mayo reta, 01 tesoura de Metzembraum curva, 01 porta agulha de Heggar, 01 pinça anatômica dente-de-rato, 02 campos fenestrados, 20 gazes e 02 campos/lençóis;

Bandeja de retirada de unha: 01 tentacânula, 01 porta agulha, 01 campo fenestrado e 20 gazes;

Bandeja de pequena cirurgia: 02 afastadores, 01 tesoura, 01 porta agulha, 01 pinça Kelly curva, 01 pinça dente-de-rato, 01 pinça anatômica, 01 cabo de bisturi, 01 campo fenestrado e 20 gazes.

6. Conscientização

O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em:

- Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS;
- Usuários atendidos sem que sejam consideradas as avaliações iniciais de risco;
- Atenção inadequada;
- Usuários liberados sem melhora em seu quadro geral;
- Óbitos ou lesões que poderiam ser evitadas;
- Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado;
- O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos;
- Danos gerais aos usuários;
- Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde.